


Om

Frejkas pute tilpasses etter barnets størrelse, enten på fødeavdelingen eller på ortopedisk poliklinikk/sykehusavdeling. Puten skal være på hele døgnet.

Behandlingstiden er ca. 4 måneder. Før behandlingen avsluttes, skal hoftene undersøkes av lege og det tas røntgenbilde og eventuelt ultralyd. Vanligvis kan samme pute brukes i hele perioden. Dersom hoftene ikke er normale etter behandling med Frejkas pute, kan annen behandling være aktuell.

Når barnet ligger på ryggen bør det bygges opp under barnets overkropp slik at barnet ikke blir liggende på skumgummikanten og med hodet ned.

OBS! Unngå å løfte barnet etter bena ved bleieskift.

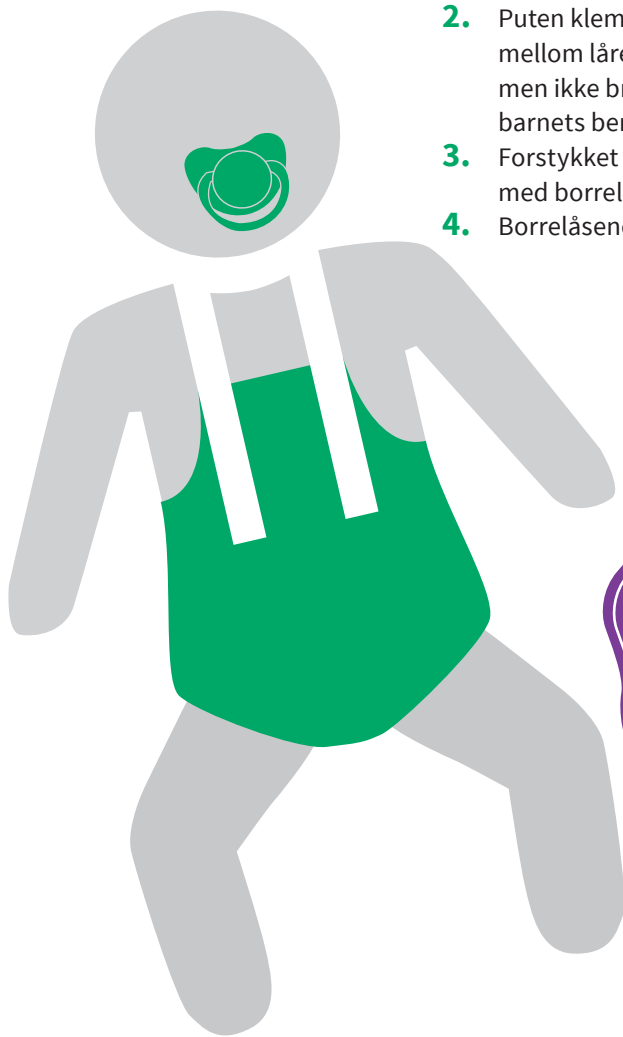

Enkel å bruke

1. Barnet legges på ryggdelen av puten
2. Puten klemmes sammen mellom lårene for å få den på plass, men ikke bruk makt for å presse barnets ben fra hverandre
3. Forstykket brettes opp og festes med borrelåsene over skuldrene
4. Borrelåsene rundt magen festes

ØNSKER DU
FLERE TREKK?
KONTAKT
SPIR SØM!

Mer info

Frejkas pute blir levert med to trekk med vaskeavvisning. Det er lurt å feste borrelåsene før vask, ellers vil disse trekke til seg mye lo.

OBS! Trekkene må ikke i tørketrommel, på grunn av borrelåsene.



Barnet bør ha lite klær inni puten. Trøye og strømpebukse/tynn sparkebukse er nok. Det er i dag ikke vanskelig å finne klær som går utenpå puten, men man må passe på at disse ikke strammer over knærne og at borrelåsene ikke gnager på huden. Bruk gjerne trøye med hals eller skjorte med krave.

Ønsker dere ytterligere informasjon, praktiske råd eller veiledning kan dere kontakte behandlende lege eller den lokale helsestasjon.

Det går an å få kjøpt nye trekk ved å henvende seg til produsenten, Spir Søm, en underavdeling av Spir Oslo.

Til høyre presenteres de ulike stofftypene.

